

Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
**nr 9037/22**



# Clinex DezoClinic

**płyn do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i narzędzi**

- Do dezynfekcji sprzętu i narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych
- Szybka, alkoholowa dezynfekcja
- Do zastosowania w obszarze medycznym

**Dostępne opakowania:**

**Indeks Nazwa indeksu**  
77-030 Clinex DezoClinic 1 L  
77-031 Clinex DezoClinic 5 L



## Właściwości:

Alkoholowy płyn do dezynfekcji powierzchni, w obszarze medycznym, domach opieki, salonach fryzjerskich, salonach kosmetycznych, gabinetach masażu oraz innych miejscach w których potrzebna jest dezynfekcja. Płyn nadaje się na wszystkie powierzchnie odporne na działanie alkoholu. Posiada działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze (w tym wobec koronawirusów).

## Zastosowanie:

1. Przed zastosowaniem produktu dokładnie umyć dezynfekowaną powierzchnię.
2. Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić około 15 ml cieczy na dezynfekowaną powierzchnię ok. 1 m<sup>2</sup>, odczekać zalecany czas podany na etykiecie.
3. Dezynfekowane powierzchnie powinny być wilgotne przez cały czas kontaktu.
4. Powierzchnię mającą kontakt z żywnością spłukać wodą przydatną do spożycia. Stosować systematycznie, zalecana temperatura stosowania 20 °C.

## TABELA ROZCIEŃCZEŃ

|                 | Działanie bakteriobójcze | Działanie grzybobójcze oraz drożdżobójcze | Działanie wirusobójcze | Działanie prątkobójcze |
|-----------------|--------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Obszar medyczny | 5 minut                  | 15 minut                                  | 60s                    | 15 minut               |

### UWAGA:

- Produkt do użytku profesjonalnego
- W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, po wymaganym czasie ekspozycji, dezynfekowane powierzchnie spłukać wodą jakości wody pitnej.
- Przed użyciem środka, w mało widocznym miejscu, sprawdzić działanie produktu na niewielkiej powierzchni
- Po każdorazowym użyciu należy pamiętać o ustawieniu dyszy atomizera w pozycji OFF. W przeciwnym razie produkt może samoczynnie wyciekać z opakowania

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.**

### BEZPIECZEŃSTWO:

- Chronić od źródeł ciepła
- Nie wystawiać opakowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- Nie mieszać z innymi produktami
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu

### WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu